

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection	Peracetic Acid
SST-2136	113-2136	Base	PESU	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT2-2136	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	113-213C	Cover	PESU	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	2136 GKT	Clear w/Gasket Cover	Polycarbonate	210 °F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
SST-2136 RD	2136 RD	Base	Polypropylene	250 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT2-2136	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	213C	Cover	Polypropylene	250 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
SST-2136 GKT	113-2136-T	Base	PPS	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT-2136	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
			Makron 2856 Polycarbonate (thermoplastic polymer) (Lid)																
	213C-GSK	Cover	Polyurethane (Gasket)	250 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	LTCH LTCH	Latch	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
SST-283 RD	1218B	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT2-1218	Basket	Polypropylene	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	1218 RD	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
SST-105 BL	105B BL	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	105C BL	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	105 BL LTCH	Latch	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
SST-105S	105B	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	105C-S	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
SST-105 RL	105B RL	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	105C RL	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	105 RL LTCH	Latch	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
SST-105-S RD	DT105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	105-C-S RD	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
SST-2006-TC	2006-4-T	Base	PPS	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	DT-2006-4-T	Basket	PPS	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	2006-C Cover	Cover	PESU	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection	Peracetic Acid
950	SST-485	485B	Base	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
951		DT-485	Basket	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
952		485C	Cover	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
953		485 L TCH	Latch	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
954	SST-835	835B	Base	Polypropylene	212 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
955		DT-835	Basket	Polypropylene	212 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
956		835C	Cover	Polypropylene	212 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
957		835 C LTCH	Latch	Polypropylene	212 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
958	SST-2415	2415-5B	Base	Polyethylene	185 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
959		2415-C	Cover	Polyethylene	185 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
960																				
961	SST-2136-SS	SS-2136	Base	Stainless Steel	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
962		DT-1322	Basket	Stainless Steel	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
963		SS213C	Cover	Stainless Steel	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
964																				
965	SST-100	SST-100	Base, cover, basket	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
966		DT-100	Basket	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
967																				
968	SST-2315	2315B	Base	Polypropylene	200 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
969		DT-2315	Basket	Polypropylene	200 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
970		2315C	Cover	Polypropylene	200 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
971																				
972	VS-3520		Verticle Soaker	Polypropylene	185 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
973																				
974	2220	2220B	Base	abs	185 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
975		2220C	Cover	abs	185 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
976																				
977	SST-866	TTC-18266	Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
978		DT-1826	Basket	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
979		TTC-1826CF	Cover	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
980																				
981	SST-BASIN	134B	Base	Stainless Steel	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
982		DT-134	Basket	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
983		134C	Cover	Stainless Steel	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
984																				
985	SST-1314-TC	113-1314-T	Base	PPS	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
986		113-1314H-T	Basket	PPS	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
987		113-131C	Cover	PESU	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
988																				
989	Scope Transport Tray w/cover	Z-WAN-ETW-LTCH	Transport Tray	Polypropylene	194 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
990																				
991	Autoclavable Trays	1209-5	Base	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
992		1714-8	Base	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
993		1714G	Cover for 1714-8	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
994		1825-7	Base	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
995		1825B	Cover for 1825-7	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
996		1910-5	Base	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
997		2016-5	Base	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
998		2016-V	Cover for 2016-5	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
999		2015-5	Base	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1000		2114-7	Klaver Base	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1001		2114B	Cover for 2114-7	Polyethylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1002																				
1003	Kleertainers	113-1066-T	Kleertainer Base	PPS	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1004		113-106C	Cover for 113-1066	PESU	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1005		113-1316-T	Kleertainer Base	PPS	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1006		113-131C	Cover for 113-1316	PESU	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1007		113-2136-T	Kleertainer Base	PPS	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1008		113-2134-T	Kleertainer Base	PPS	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1009		113-213C	Cover for 113-213x	PESU	285 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1010																				
1011	Transtainers	TTC-1218CF	Cover for TTC 128x	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1012		TTC-12183	Transtainer Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1013		TTC-12186	Transtainer Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1014		TTC-1218B	Transtainer Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1015		TTC-1826CF	Cover for TTC 1826x	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1016		TTC-18263	Transtainer Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1017		TTC-18266	Transtainer Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1018		TTC-18269	Transtainer Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1019		TTC-18265	Transtainer Base	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1020		TTC-1218CF	Cover for TTC 12 x 18	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1021																				
1022	Drain Plugs	528DP-AF-AM	Drain Plugs	Polypropylene	160 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1023		538DP	Drain Plugs	Polypropylene	285 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1024		SST-2315 DP	Drain Plugs	Polypropylene	200 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
1025		SST-485 DP	Drain Plugs	Polypropylene</																